

外周血（推片机）简易操作卡

一、操作步骤

1.1 推片准备：检查上料盒内是否有充裕的玻片，上料盒是否正确放置在设备卡槽内。

1.2 选择推片参数：点击推片参数键，名称1为骨髓小粒样本推片；名称2为正常骨髓样本推片；名称3为贫血样本推片；名称4为外周血样本推片；选择名称为4的外周血推片参数名称后，即选中该参数名称下的程序进行推片，屏幕会返回到主界面，在主界面也会显示当前推片的相关参数。

1.3 上料：第一次点击上料键，执行上料动作，等待设备将上料盒内最下面的两个玻片同时推出到玻片夹内。第二次点击上料键，等待设备将玻片推出到玻片载架上，操作人员用移液枪取2微升的样本滴到玻片上（需要注意对应玻片载架上小圆孔的位置）

1.4 推片：操作人员点击推片键，等待设备自动推片结束，并且设备自动复位停止后，取下玻片载架上的玻片即可。

二、注意事项

2.1 玻片放置在上料盒内的时候，玻片需要放置在上料盒的两侧并且放置平整；上料盒需要沿上料盒侧面的箭头方向放入设备卡槽内，确保上料盒不会移动、晃动；

2.2 若在上料动作过程中，玻片未正常推出，或者发现玻片卡在上料盒与玻片夹中间，需要关闭电源，及时将卡住的玻片取出，并且核查玻片是否平整放置在上料盒内，确保无误后再开机进行复位、上料和推片操作；

2.3 若设备在运行过程中发出异响，请及时关闭电源、拔下电源插头，检查设备，排除问题后才可进行重新开机；

2.4 设置推片角度：推片角度值越大，推片后的样本长度就越短；推片角度值越小，推片后的样本长度就越长；

2.5 设置推片速度：推片速度值越大，推片后的样本长度就越短；推片速度值越小，推片后的样本长度就越长，样本的厚度会随着推片速度的增加而增加。