

诊断库

- 1.诊断意见模板总数量多达300种以上，数据库定期更新
- 2.诊断意见由君安医学细胞平台专家提供

专家共识与指南

- 血细胞分析报告规范化指南
- 造血与淋巴组织肿瘤检验诊断报告模式专家共识
- 尿液检验有形成分名称与结果报告专家共识
- 脑脊液细胞形态学检验专家共识（2023版）
- 浆膜腔积液细胞形态学检验专家共识（2023版）
- 支气管肺泡灌洗液细胞形态学检验专家共识（2023版）
- 前列腺液专家共识（2023版）
- 关节液形态学检验专家共识（2023版）



标本种类


外周血、骨髓、胸腹水、脑脊液、肺泡灌洗液、尿液、关节液、阴道分泌物、纤支镜刷片、脱落细胞学检查、淋巴结穿刺、甲状腺穿刺、乳腺穿刺、前列腺液、精液、痰液等

系统参数

- ①标本管理：支持对多种标本类型进行管理，如骨髓细胞、外周血细胞形态学检查，胸腹水、脑脊液、肺泡灌洗液、关节腔液、尿液等。
- ②显微成像：≥3200万像素显微专用超清相机，实时获取镜下细胞影像，电脑显示器中呈现的细胞图与镜下观察的细胞色彩一致、不失真。可随时抓取图像，同时支持视频录制，可自由选择保存路径。支持导出照片或视频回放。
- ③图片编辑：支持多张图片景深合成，可拼接细胞高清大图，支持对抓取的图片进行标注说明。
- ④报告模块：支持多种常见类型报告，同时可根据需要报告模版个性化定制；支持报告单的预览、打印；支持发布临时报告（水印版）；支持报告撤回，且可监控再次发布报告的状态；支持报告发送至lis及his系统；支持报告签发时的数字签名。
- ⑤病例管理：数据日志系统记录，操作可追溯，满足ISO15189管理要求，并减少多人操作可能造成的争议。拥有查询、统计、自动备份等多种功能。MDT多学科会诊，实验室报告结果查询：支持LIS连接，可快速查看某病人当前病程记录 and 所有项目结果，项目数据之间可直观对比分析。
- ⑥接口定制开发：图文报告系统与lis系统、his系统、集成平台，数据互联互通。支持服务器版本，一机多点位使用
- ⑦辅助诊断：可自定义参数，如骨髓粒红比设置参数后，系统可自动获取检验项目数据填入等，同时支持诊断数据库定期更新。
- ⑧示教系统：提供室间质评的示教系统，包括血细胞、寄生虫、尿沉渣子模块。提供200个数字化玻片全景细胞形态学图库，数字化玻片全景图可自由缩放。海量题库训练。

（骨髓+体液）细胞学图文报告系统基本配置

增强版	标准版	标配版	JEDU-IVD-5000体液图文报告系统	一套
			三目生物显微镜	一套
			数码摄像机	一台
			高性能多媒体计算机	一台
			彩色打印机、条码枪等	一套
			LIS接口	一套
			骨髓/体液细胞计数器	一台
			细胞图集工作站	一台
			诊断辅助模块	一套
			细胞学示教考试系统	一套
			远程会诊系统	一套

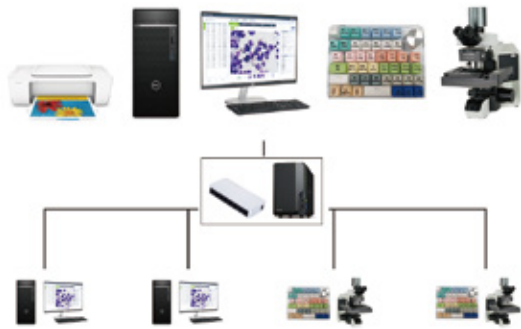

智能骨髓/血片细胞计数器

智能骨髓/血片细胞计数器主要用于骨髓细胞、细胞化学染色结果、外周血细胞分类计数，并自动计算分析出各项指标，它能与显微镜配合使用，能对骨髓细胞、外周血细胞等细胞进行全面的计数并自动计算分析出各项指标。

抓拍功能：在操作显微镜同时快捷键抓拍细胞，并保存到文件夹。

君安细胞计数器采用细胞分类及手指操作习惯进行设置细胞按键，操作计数简单。存储、打印、调阅方便，是血液科、检验科骨髓检查设备升级换代的最佳产品。



骨髓细胞计数								— □ ×	
文件名: 骨髓①									
No.	项目ID	中文名称	血片	%	镜下	%	参考值		
1	13060001	原始细胞					0.07-0.09		
粒系细胞									
3	13060002	原始粒细胞型					0.31-0.97		
4	13060003	原始粒细胞亚型					0.31-0.97		
5	13060004	早幼粒细胞					0.97-2.17		
6	13060006	中性中幼粒细胞					4.45-8.53		
7	13060007	中性晚幼粒细胞					5.93-9.87		
8	13060008	中性杆状核粒细胞					20.22-27.22		
9	13060009	中性杆状核粒细胞					6.52-12.36		
10	13060011	嗜酸中幼粒细胞					0.15-0.61		
11	13060012	嗜酸晚幼粒细胞					0.17-0.81		
12	13060013	嗜酸杆状核粒细胞					0.64-1.06		
13	13060014	嗜酸杆状核粒细胞					0.25-1.47		
14	13060016	嗜碱中幼粒细胞					-0.03-0.07		
15	13060017	嗜碱晚幼粒细胞					-0.01-0.13		
16	13060018	嗜碱杆状核粒细胞					-0.03-0.35		
17	13060019	嗜碱杆状核粒细胞					-0.02-0.08		
红细胞系									
19	13060020	原始红细胞					0.27-0.87		
20	13060021	早幼红细胞					0.51-1.33		
21	13060022	中幼红细胞					5.5-9.32		
22	13060023	晚幼红细胞					8.39-13.11		
23	13060024	网织红细胞							
24	13060025	异常幼稚红细胞							

血片细胞计数: ☐ 血片细胞计数: ☐

功能介绍

1、骨髓细胞计数分析


能对人体40余种骨髓细胞进行分类计数，当计数达到200个时，会发出信号，在计数器上实时显示数量，其中有细胞计数、各种细胞个数、百分率、白红比例、粒红比例等，对镜下巨核细胞等视野可拍照存图、计数，并且可直接同步图文报告软件。

2、外周血细胞计数分析

能对外周血中常见的5种主要细胞即中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞进行技术分析,若出现幼稚细胞也能进行计数分析,检验人员只需将观察到的外周血各种细胞输入电脑,立即能显示出各种细胞百分率及细胞总计数、各种细胞个数等指标,速度快、方便、正确,并且可直接同步图文报告软件。

细胞图集工作站

- 1.图片存储数量可以支持5年以上（超大存储空间）
- 2.支持在医院局域网共享，或者虚拟专网共享或者访问。
- 3.支持存储4K高清图片和常用的视频格式，如MP4影像。
- 4.方便医生手机或PC端同步查看。
- 5.支持文件名称自定义，或系统默认根据时间年月日自动命名。

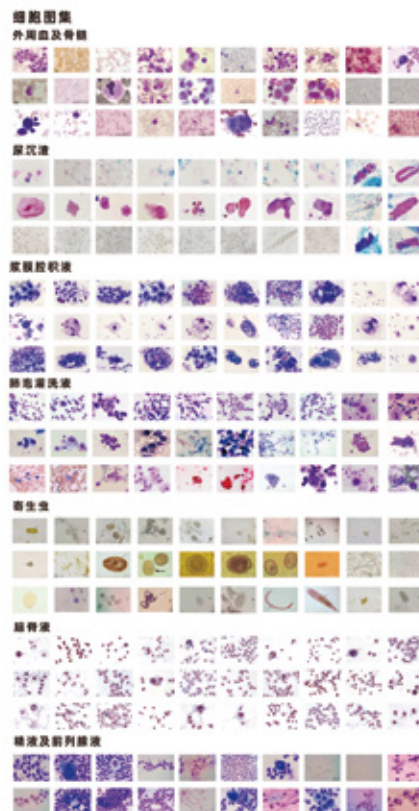

某市某医院

胸腹水常规细胞学检查报告单

姓名: 登记号: a21453

性别: 男 住院号: 384224

年龄: 63岁 床号: 1

临床诊断:

申请医院: XX人民医院

申请科室: XX科


申请医生: XXX


标本类型: 胸腹水

标本状态: 正常

标本号: 8002

检验项目	结果	单位	参考区间
颜色	淡黄		淡黄色
透明度	浑浊		透明
蛋白定性 (李凡他试验)	阳性		阴性
有核细胞计数	3600	$\times 10^6/L$	
红细胞计数	12600	$\times 10^6/L$	
中性粒细胞	10	%	
淋巴细胞	35	%	
嗜酸性粒细胞	5	%	
巨噬细胞	45	%	
间皮细胞	5	%	
细菌/真菌	未发现		

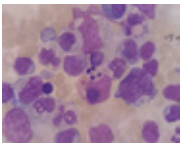

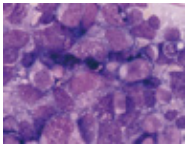

瑞氏染色*1000

瑞氏染色*1000

结果描述:

涂片可见大量红细胞,有核细胞量多,以巨噬细胞为主,可见较多体积较大的异常淋巴细胞,考虑淋巴瘤侵犯可能,未见细菌及真菌。

提示及建议:

涂片有核细胞量多,以巨噬细胞为主,可见较多体积较大的异常淋巴细胞,考虑淋巴瘤侵犯可能,建议做流水式细胞检测。

报告日期: 2020-08-13 报告日期: 2020-08-13 检验科: X X X 审核者: X X X

提示: 检验结果仅对本次送检标本负责! 如有疑问, 请于报告出具后两天内提出咨询

详细地址: XX市XX区XX路XX号门诊楼2楼 联系电话: 010-83652653

某市某医院

脑脊液常规细胞学检查报告单

姓名: 登记号: a21432

性别: 男 住院号: 384232

年龄: 54岁 床号: 3

临床诊断:

申请医院: XX人民医院

申请科室: XXX科


申请医生: XXX


标本类型: 脑脊液

标本状态: 正常

标本号: 8004

检验项目	结果	单位	参考区间
颜色	淡黄		无色
透明度	微混		透明
排蛋白定性	1+		阴性~弱阳性
细胞总数	4640	$\times 10^6/L$	
有核细胞数	98	$\times 10^6/L$	0-5
红细胞数	4542	$\times 10^6/L$	0
中性粒细胞	2	%	
淋巴细胞	76	%	
单核巨噬细胞	21	%	
浆细胞	1	%	
间皮细胞	发现		
细菌/真菌	未发现		

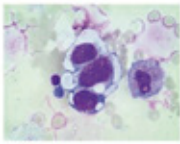

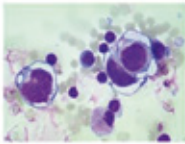

瑞氏染色*1000

瑞氏染色*1000

实验室提示:

脑脊液常规细胞学,细胞呈淋巴细胞形态,未见大量红细胞,涂片可见大量淋巴细胞,淋巴细胞呈弥漫性分布,未见细菌及真菌。

提示及建议:

脑脊液常规细胞学,细胞呈淋巴细胞形态,未见大量红细胞,涂片可见大量淋巴细胞,淋巴细胞呈弥漫性分布,未见细菌及真菌。

报告日期: 2020-08-13 报告日期: 2020-08-13 检验科: X X X 审核者: X X X

提示: 检验结果仅对本次送检标本负责! 如有疑问, 请于报告出具后两天内提出咨询

详细地址: XX市XX区XX路XX号门诊楼2楼 联系电话: 010-83652653

某市某医院

关节液常规细胞学检查报告单

姓名: 登记号: a21786

性别: 男 住院号: 384356

年龄: 45岁 床号: 4

临床诊断:

申请医院: XX人民医院

申请科室: XXX科


申请医生: XXX


标本类型: 关节液

标本状态: 正常

标本号: 8008

检验项目	结果	单位	参考区间
颜色	无色		
透明度	微混		
凝块	无		
白细胞计数	1903	$\times 10^6/L$	
红细胞计数	3000	$\times 10^6/L$	
中性粒细胞	78	%	
淋巴细胞	3	%	
单核巨噬细胞	4	%	
巨噬细胞	14	%	
间皮细胞	1	%	

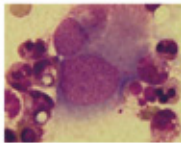

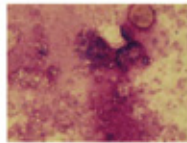

瑞氏染色*1000

瑞氏染色*1000

结果描述:

涂片有核细胞量多,可见大量淋巴细胞及单核巨噬细胞,中性粒细胞增多,可见巨噬细胞,淋巴细胞和单核巨噬细胞,淋巴细胞呈弥漫性分布,未见大量红细胞,未见细菌及真菌。

提示及建议:

涂片有核细胞量多,可见大量淋巴细胞及单核巨噬细胞,中性粒细胞增多,可见巨噬细胞,淋巴细胞和单核巨噬细胞,淋巴细胞呈弥漫性分布,未见大量红细胞,未见细菌及真菌。

报告日期: 2020-08-13 报告日期: 2020-08-13 检验科: X X X 审核者: X X X

提示: 检验结果仅对本次送检标本负责! 如有疑问, 请于报告出具后两天内提出咨询

详细地址: XX市XX区XX路XX号门诊楼2楼 联系电话: 010-83652653

某市某医院

肺泡灌洗液常规细胞学检查报告单

姓名: 登记号: a21243

性别: 女 住院号: 384342

年龄: 34岁 床号: 2

临床诊断:

申请医院: XX人民医院

申请科室: XXX科


申请医生: XXX


标本类型: 肺泡灌洗液

标本状态: 正常

标本号: 8006

检验项目	结果	单位	参考区间
颜色	无色		
透明度	透明		
有核细胞计数	110	$\times 10^6/L$	
红细胞计数	1000	$\times 10^6/L$	
中性粒细胞	15	%	$\leq 3\%$
淋巴细胞	0	%	$\leq 15\%$
嗜酸性粒细胞	8	%	$\leq 0.5\%$
嗜碱性粒细胞	0	%	$\leq 0.5\%$
巨噬细胞	70	%	$\geq 80\%$
间皮细胞	2	%	$\leq 5\%$
纤毛柱状上皮细胞	5	%	$\leq 5\%$
间皮细胞			

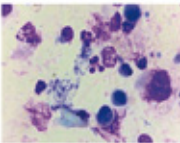

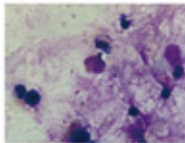

瑞氏染色*1000

瑞氏染色*1000

结果描述:

涂片有核细胞量多,以巨噬细胞为主,中性粒细胞和嗜酸性粒细胞比例增高,可见纤毛柱状上皮细胞和间皮细胞,未见大量红细胞,未见细菌及真菌。

提示及建议:

涂片有核细胞量多,以巨噬细胞为主,中性粒细胞和嗜酸性粒细胞比例增高,可见纤毛柱状上皮细胞和间皮细胞,未见大量红细胞,未见细菌及真菌。

报告日期: 2020-08-13 报告日期: 2020-08-13 检验科: X X X 审核者: X X X

提示: 检验结果仅对本次送检标本负责! 如有疑问, 请于报告出具后两天内提出咨询

详细地址: XX市XX区XX路XX号门诊楼2楼 联系电话: 010-83652653

经销商:

杭州君安数字诊断技术有限公司
地址:杭州市火炬大道三维大厦B座10层
邮箱: 23478313@qq.com
电话: 15224076461 13336032398
13306501166

君安医学细胞
平台入群码

资料下载地址